



ZAMST A2-DX PAHKLUU TUGI

KASUTUSJUHEND

Alljärgnev juhend tuleb enne toote kasutamist hoolikalt läbi lugeda.

Kavandatud kasutus: Pahkluu kaitse. Pahkluu sisse- ja väljapööramise piiramine. Pahkluu eesmise osa stabiilsus.

*Käesolev toode ei ole mõeldud raviotstarbeks.

* Käesolev toode on mõeldud pahkluu toetamiseks; kuid see ei hoia ära kõiki pahkluuvigastusi .

Toodet ei tohi kasutada alltoodud juhtudel:

-Kui toote kasutamise piirkonnas esineb löikehaavu, luumurde, tundetust, paistetust või lõövet.

Ohutusabinõud:

- Kui toote kasutamise ajal esineb valu, paistetust, nahaärritus, ebamugavust või muud ebatavaline reaktsioon, siis tuleb toote kasutamine lõpetada ning konsulteerida arstiga.
 - Kui teil on tundlik nahk või kui teil esineb allergiat, siis võib toote kasutamine põhjustada lõövet või allergilisi reaktsioone. Selliste sümptomite esinemise korral tuleb toote kasutamine lõpetada ning konsulteerida arstiga.
 - Toodet ei tohi kasutada magamise ajal. Kui toode magamise ajal valesse asendisse liigub või kui seda kasutatakse pikema aja vältel, võib see häirida vereringet.
 - Kui kehaosa on pikemat aega toetatud, võib see avaldada kahjulikku mõju vereringele või tekitada ebamugavust. Sellise olukorra vältimiseks on soovitatav toode regulaarselt eemaldada ning hiljem soovitud kohale uuesti tagasi asetada.
 - Toodet ei tohi kasutada juhul, kui tegelete spordialaga, mille korral toote plastikosad (näiteks jäik kaitse) võiksid teisi inimesi kahjustada.
 - Toodet ei tohi kasutada, kui see on katki või kulunud või kui takjakkinnitus ei tööta.
 - Enne toote kasutamist tuleb veenduda, et tegemist on õiges suuruses ja õigele jalale (vasaku või parema jala jaoks) mõeldud tootega. (Vt. pakendil toodud suuruste tabelit ja toote sees asuvat suurusnumbri etiketti.)
 - Rihmu ei tohi liiga kõvasti kinni tõmmata ning tugi ei tohi avaldada liiga tugevat survet.
 - Kui toode nihkub oma kohalt või lõtvub, siis tuleb toode vastavalt punktis "Kuidas kasutada" toodud juhiste uuesti paigaldada.
 - Toodet ei tohi muuta ega parandada. See võib muuta toote kasutuskõlbmatuks ja/või põhjustada kehavigastusi.
 - Toodet tuleb kanda soki peal. Toote kandmine otse nahal võib põhjustada ebamugavust.
- Toote kahjustamise ennetamiseks:**
- Toode võib higistamise või muude vedelike toimel värvi muuta. Toode võib selle all või lähedal kantavatele riietele värvi anda.
 - Veenduge, et takjakkinnitused ei puutuks kanga vastu, kuna need võivad kangast kahjustada.

Kuidas kasutada:

* Joonistel on kujutatud parema jala pahkluid.

1. Avage ja lõdvendage kõik takjakkinnitused. Asetage jäigad toed pahkluu taha. Hoidke pahkluid vertikaalses asendis. Libistage jalg läbi toe seni, **kuni sisekülje pahkluu on punktiiriga tähistatud ala samal joonel, mis jääb jäiga toe needi kohale.** (Joonis 1-a) Kontrollige, et jala keskjoon oleks toe keskjoone (õmbluse) all. (Joonis 1-b)
2. Tõmmake kinnitushaake (A and B) risti hoides ülespoole. Kinnitage haak (A). (Joonis 2)
3. Mähkige tugi tihedalt ümber pahkluu, tõmmates B (kinnitushaak) ja C nii, et toetus ei väheneks. Kinnitage B. (Joonis 3)
4. Tõmmake ristuvaid rihmu vastassuunas. Kinnitage nende servad pahkluu kohal pahkluu vastaskülgedel. (Joonis 4)
5. Hoidke jäigad toed püstises asendis. Paigutage need nii, et toe kõrgem osa (vahetult needi kohal) ulatub üle pahkluu, mis on tähistatud punktiirjoonega (D), reguleerides ülemise rihma tagumise osa pikkust. Tugede stabiliseerimiseks kinnitage iga jäiga toe siseküljel asuvad haagid. (Joonised 5-a and 5-b)
6. Hoidke jäiku tugesid ühe käega paigal. Mähkige ülemine rihm ümber sääre ja viige rihm läbi plastikaasa (E). (Joonis 6-a) Voltige rihm tagasi. Kinnitage haak. (Joonis 6-b)
7. Toode on nõuetekohaselt kinnitatud. (Joonis 7)
 - a. Vaade eest
 - b. Vaade välisküljelt
 - c. Vaade tagant
8. Puhvrite (F) sisestamine. (Joonis 8)
A2-DX müüakse koos kahe puhvriga. Puhvreid saab kasutada juhul, kui jäik materjal põhjustab ebamugavust.
Näited:
 - a. Jäiga toe pealmise osa jaoks.
 - b. Pahkluu piirkonna jaoks.
 - c. Sisemise needi piirkond.

Kuidas pesta:

-Pesta käsitsi pehmetoimelise pesuvahendiga ning lasta õhu käes kuivada. -Toodet ei tohi kuivatada pesukuivatis. Toodet ei tohi keemiliselt puhastada ega triikida. Mitte kasutada kloori sisaldavaid tooteid, sealhulgas pleegitusaineid. Need võivad toodet kahjustada.

-Toode võib värvi anda. Toodet ei tohi pesta koos valge või värvilise pesuga.

Koostis: Nailon, stüreen, polüester, polüuretaan, polüetüleen (jäigad toed) ja messing (neet)

Maaletooja: A2K Sport OÜ, Papiiniidu 5, Pärnu, Tel: 44 52 936; fax:44 52 938, e-mail: info@a2k.ee, www.a2k.ee