


1




2



3

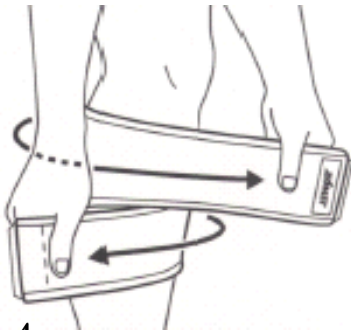

4

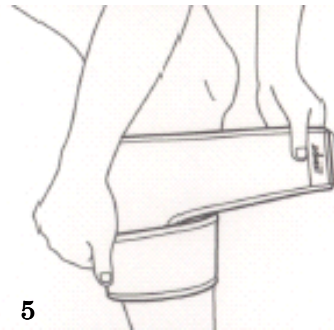

5



6

ZAMST CS-1 SÄÄREMARJA TUGI

KASUTUSJUHEND

Alljärgnev juhend tuleb enne toote kasutamist hoolikalt läbi lugeda.

Kavandatud kasutus: Sääremarja toestamine

* Käesolev toode ei ole mõeldud raviotstarbeks.

* Käesolev toode on mõeldud sääremarja toetamiseks; kuid see ei hoiä ära kõiki sääremarja vigastusi.

Toodet ei tohi kasutada alltoodud juhtudel:

- Kui toote kasutamise piirkonnas esineb löikehaavu, luumurde, tundetust, paistetust või löövet.

Ohutusabinõud:

- Kui toote kasutamise ajal esineb valu, paistetust, nahaärritus, ebamugavust või muud ebatavaline reaktsioon, siis tuleb toote kasutamine lõpetada ning konsulteerida arstiga.

- Kui teil on tundlik nahk või kui teil esineb allergiat, siis võib toote kasutamine põhjustada löövet või allergilisi reaktsioone. Selliste sümptomite esinemise korral tuleb toote kasutamine lõpetada ning konsulteerida arstiga.

- Toodet ei tohi kasutada magamise ajal. Kui toode magamise ajal valesse asendisse liigub või kui seda kasutatakse pikema aja vältel, võib see häirida vereringet.

- Kui kehaosa on pikemat aega toetatud, võib see avaldada kahjulikku mõju vereringele või tekitada ebamugavust. Sellise olukorra vältimiseks on soovitatav toode regulaarselt eemaldada ning hiljem soovitud kohale uuesti tagasi asetada.

- Toodet ei tohi kasutada, kui see on katki või kulunud või kui takjakinne ei tööta.

- Toode peab olema õiges suuruses. (Vt. pakendil toodud suuruste tabelit ja toote sees asuvat suurusnumbri etiketti.)

- Rihma ei tohi liiga kõvasti kinni tõmmata ning tugi ei tohi avaldada liiga tugevat survet.

- Kui toode nihkub oma kohalt või lõtvub, siis tuleb toode vastavalt punktis "Kuidas kasutada" toodud juhistele uuesti paigaldada.

- Toodet ei tohi muuta ega parandada. See võib muuta toote kasutuskõlbmatuks ja/või põhjustada kehavigastusi.

Toote kahjustamise ennetamiseks:

- Toode võib higistamise või muude vedelike toimel värvi muuta. Toode võib selle all või lähedal kantavatele riietele värvi anda.

- Veenduge, et takjakinne ei puutuks kanga vastu, kuna need võivad kangast kahjustada.

Kuidas kasutada:

* Toode ei ole mõeldud kasutamiseks spetsiaalselt paremal või vasakul pool, mistõttu kasutamine toimub samal viisil

mõlemal jalal.

1. Avage kõik takjakinnitused. (Joonis 1)
2. Paigutage toe põhiosa (A joonisel 1) sääremarja piirkonda. Jälgige, et õmblus oleks säärega paralleelne. (Joonis 2)
3. Tõmmake mõlemaid rihmu ümber sääre. Kontrollige, et toote põhiosa ei oleks keerdus ega nihkuks õigest kohast eemale. (Joonis 3)
4. Tõmmake mõlemaid rihmu horisontaalselt vastupidises suunas. (Joonis 4)
5. Tõmbamise ajal kinnitage alumise rihma haak. (Joonis 5)
6. Tõmbamise ajal kinnitage ülemise rihma haak. (Joonis 6)

Kuidas pesta:

- Pesta käsitsi pehmetoimelise pesuvahendiga ning lasta õhu käes kuivada. - Toodet ei tohi kuivatada pesukuivatis.

Toodet ei tohi keemiliselt puhastada ega triikida. Mitte kasutada kloori sisaldavaid tooteid, sealhulgas pleegitusaineid.

Need võivad toodet kahjustada.

-Toode võib värvi anda. Toodet ei tohi pesta koos valge või värvilise pesuga.

Koostis: Nailon, polüester ja stüreen