


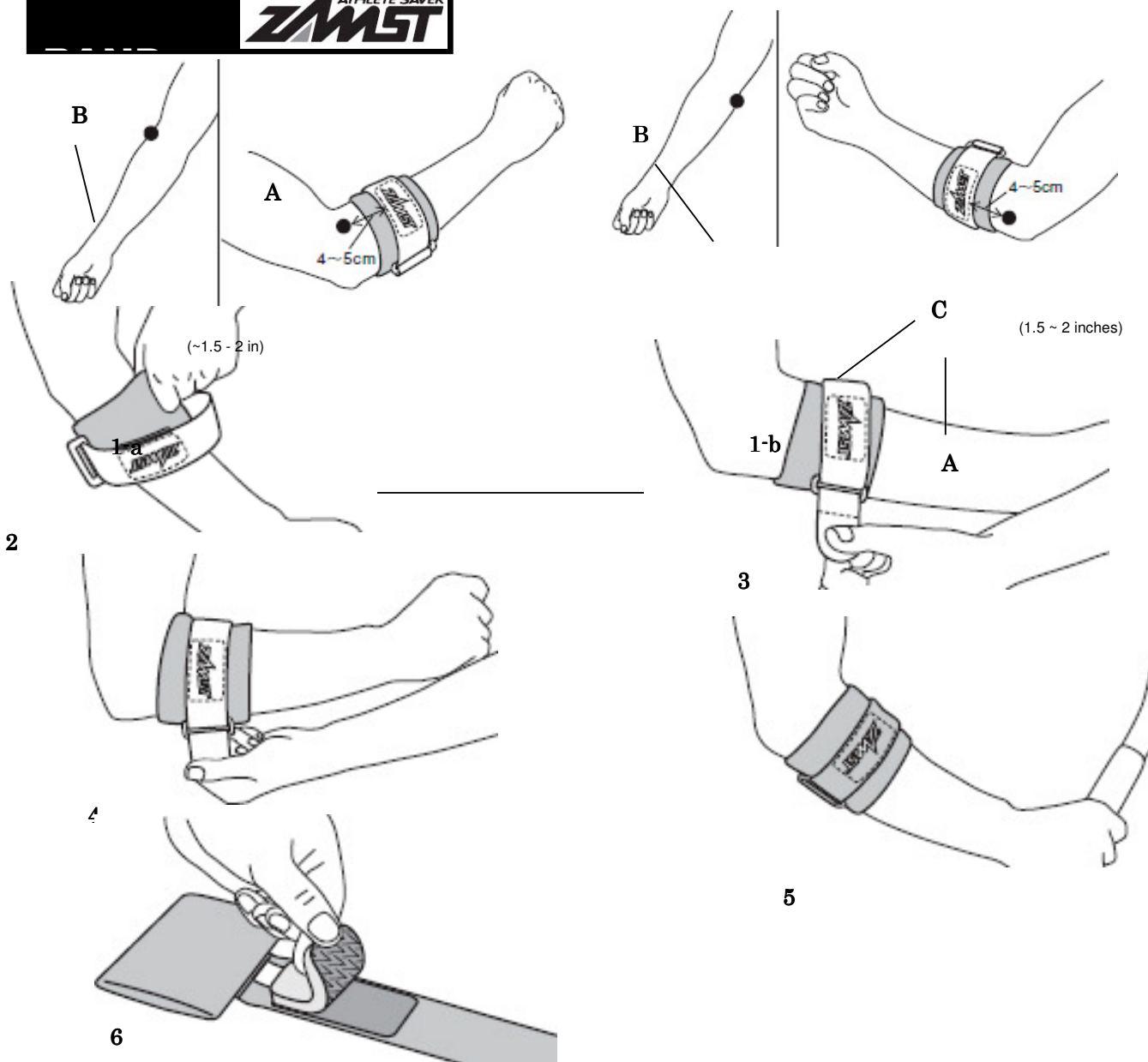

ZAMST KÜÜNARNUKI SIDE KASUTUSJUHEND

2009 01 05

Alljärgnev juhend tuleb enne toote kasutamist hoolikalt läbi lugeda.

Kavandatud kasutus: Käsivarre toestamine.

*Käesolev toode ei ole mõeldud raviotstarbeks.

* Käesolev toode on mõeldud küünarnuki toetamiseks; kuid see ei hoia ära kõiki küünarnukivigastusi.

Toodet ei tohi kasutada alltoodud juhtudel:

-Kui toote kasutamise piirkonnas esineb löikehaavu, luumurde, tundetust, paistetust või löövet.

Ohutusabinõud:

- Kui toote kasutamise ajal esineb valu, paistetust, nahaärritus, ebamugavus või muud ebatavaline reaktsioon, siis tuleb toote kasutamine lõpetada ning konsulteerida arstiga.

- Kui teil on tundlik nahk või kui teil esineb allergiat, siis võib toote kasutamine põhjustada löövet või allergilisi reaktsioone. Selliste sümptomite esinemise korral tuleb toote kasutamine lõpetada ning konsulteerida arstiga.
- Toodet ei tohi kasutada magamise ajal. Kui toode magamise ajal valesse asendisse liigub või kui seda kasutatakse pikema aja vältel, võib see häirida vereringet.
- Kui kehaosa on pikemat aega toestatud, võib see avaldada kahjulikku mõju vereringele või tekitada ebamugavust. Sellise olukorra vältimiseks on soovitatav toode regulaarselt eemaldada ning hiljem soovitud kohale uuesti tagasi asetada.
- Toodet ei tohi kasutada, kui see on katki või kulunud või kui takjakinnitus ei tööta.
- Enne toote kasutamist tuleb veenduda, et tegemist on õiges suuruses tootega. (Vt. pakendil toodud suuruste tabelit ja toote sees asuvat suurusnumbri etiketti.)
- Rihma ei tohi liiga kõvasti kinni tõmmata ning tugi ei tohi avaldada liiga tugevat survet.
- Kui toode nihkub oma kohalt või lõtvub, siis tuleb toode vastavalt punktis "Kuidas kasutada" toodud juhiste uuesti paigaldada.
- Toodet ei tohi muuta ega parandada. See võib muuta toote kasutuskõlbmatuks ja/või põhjustada kehavigastusi.

Toote kahjustamise ennetamiseks:

- Toode võib higistamise või muude vedelike toimele värvi muuta. Toode võib selle all või lähedal kantavatele riistele värvi anda.
- Veenduge, et takjakinnitused ei puutuks toote põhiosa (pehme riba) ega muu kanga vastu, kuna need võivad kangast kahjustada.

Kuidas kasutada:

* Joonistel on kujutatud paremat käsivart. Toode ei ole mõeldud spetsiaalselt paremal või vasakul pool kasutamiseks, mistõttu kasutamine toimub samal viisil ka vasakul käsivarrel.

*Uuest tootest võib eralduda lõngakiude. See ei mõjuta toote kvaliteeti.

1. Paigaldage toode nii, et küünarnuki padi (A) paikneks ligikaudu 4 kuni 5 cm (1.5 kuni 2 in) küünarnuki valulikust kohast allpool (B) .
Joonis 1-a: Kui valu esineb küünarnuki välisküljel.
Joonis 1-b: Kui valu esineb küünarnuki siseküljel.
2. Avage takjakinnitus. Libistage tugi kätt mööda üles seni, kuni see jõuab eelmises punktis nimetatud kohani. Jälgige hoolikalt, et toode ei kataks küünarliigest. (Joonis 2)
3. Mähkige rihm (C) ümber käsivarre. Viige rihm läbi D-rõnga. Asetage küünarnuki padi valulikule küljele. Küünarnuki padja paigutamise kohta vt. punkt 1. (Joonis 3)
4. Kontrollige küünarnukipadja asendit. Reguleerige toetuse taset. Kinnitage haak. (Joonis 4)
5. Toode on nõuetekohaselt kinnitatud. (Joonis 5)

Kuidas pesta:

- Pesta käsitsi pehmetoimelise pesuvahendiga ning lasta õhu käes kuivada. -Toodet ei tohi kuivatada pesukuivatis.
- Toodet ei tohi keemiliselt puhastada ega triikida. Mitte kasutada kloori sisaldavaid tooteid, sealhulgas pleegitusaineid. Need võivad toodet kahjustada.
- Toode võib värvi anda. Toodet ei tohi pesta koos valge või värvilise pesuga.
- *Küünarnuki padi tuleb enne toote pesemist eemaldada. (Joonis 6) Küünarnuki padja võib tagasi paigutada alles siis, kui toode on täiesti kuiv.

Koostis: Puuvill, nailon, polüuretaan ja polüatsetaal

Maaletooja: A2K Sport OÜ, Papiniidu 5, Pärnu, Tel: 44 52 936; fax:44 52 938, e-mail: info@a2k.ee, www.a2k.ee