



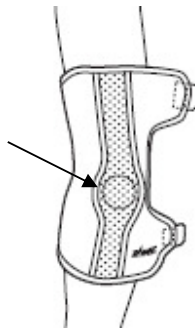

B



2

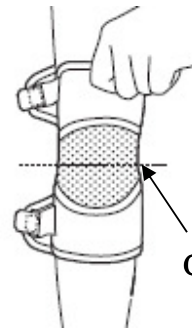


C



3



4

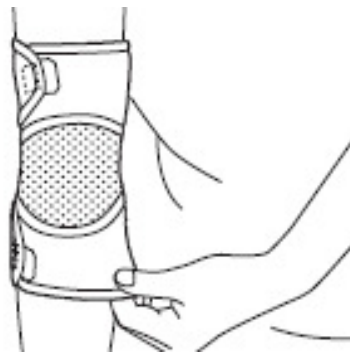

5

ZAMST KÜÜNARNUKI KAITSE KASUTUSJUHEND

Alljärgnev juhend tuleb enne toote kasutamist hoolikalt läbi lugeda.

Kavandatud kasutus: Küünarliigese toetamine ja kaitse

* Käesolev toode ei ole mõeldud raviotstarbeks.

* Käesolev toode on mõeldud küünarnuki toetamiseks; kuid see ei hoi ära kõiki küünarnuki vigastusi.

Toodet ei tohi kasutada alltoodud juhtudel:

- Kui toote kasutamise piirkonnas esineb löikehaavu, luumurde, tundetust, paistetust või löövet

Ohutusabinõud:

- Kui toote kasutamise ajal esineb valu, paistetust, nahaärritust, ebamugavust või muud ebatavaline reaktsioon, siis tuleb toote kasutamine lõpetada ning konsulteerida arstiga.

- Kui teil on tundlik nahk või kui teil esineb allergiat, siis võib toote kasutamine põhjustada löövet või allergilisi reaktsioone. Selliste sümptomite esinemise korral tuleb toote kasutamine lõpetada ning konsulteerida arstiga.

- Toodet ei tohi kasutada magamise ajal. Kui toode magamise ajal valesse asendisse liigub või kui seda kasutatakse pikema aja vältel, võib see häirida vereringet.

- Kui kehaosa on pikemat aega toetatud, võib see avaldada kahjulikku mõju vereringele või tekitada ebamugavust. Sellise olukorra vältimiseks on soovitatav toode regulaarselt eemaldada ning hiljem soovitud kohale uuesti tagasi asetada.

- Toodet ei tohi kasutada, kui see on katki või kulunud või kui takjakinne ei tööta.

- Toode peab olema õiges suuruses. (Vt. pakendil toodud suuruste tabelit ja toote sees asuvat suurusnumbri etiketti.)

- Rihma ei tohi liiga kõvasti kinni tõmmata ning tugi ei tohi avaldada liiga tugevat survet.
- Kui toode nihkub oma kohalt või lõtvub, siis tuleb toode vastavalt punktis "Kuidas kasutada" toodud juhistele uuesti paigaldada.
- Toodet ei tohi muuta ega parandada. See võib muuta toote kasutuskõlbmatuks ja/või põhjustada kehavigastusi.

Toote kahjustamise ennetamiseks:

- Toode võib higistamise või muude vedelike toimel värvi muuta. Toode võib selle all või lähedal kantavatele riietele värvi anda.
- Veenduge, et takjakinnitused ei puutuks kanga vastu, kuna need võivad kangast kahjustada.

Kuidas kasutada:

* Joonistel on kujutatud parem käsivars. Toode ei ole mõeldud kasutamiseks spetsiaalselt paremal või vasakul pool, mistõttu kasutamine toimub samal viisil ka vasakul käsivarrel.

1. Avage kõik takjakinnitused. Pistke küünarvars kaitsmest läbi. Toote logo (A) jääb randme poole. Kontrollige, et küünarvars (randmest küünarnukini) ja kaitse on otse. (Joonis 1)
2. Libistage kaitse käsivart mööda üles, kuni küünarnukk asub "küünarnuki kohta" all (B). Küünarnuki koht on küünarnukki kattev lai ala. Joon C näitab küünarnuki paindumise kohta. (Joonis 2)
3. Hoidke käsi otse. Kinnitage küünarvarre haak nõuetekohase survega. Haagi ja toote põhiosa vahel on kummipael. Kui haaki ja paela korraga tõmmata, siis kaitse ei keerdu ning haaki on lihtne kinnitada. (Joonis 3)
4. Ülemise käsivarre haagi õige survega kinnitamiseks tuleb korrata punkti 3. (Joonis 4)
5. Vajadusel võib kaitset tõmmata või reguleerida. Toode on nõuetekohaselt kinnitatud. (Joonis 5)

Kuidas pesta:

- Pesta käsitsi pehmetoimelise pesuvahendiga ning lasta õhu käes kuivada. - Toodet ei tohi kuivatada pesukuivatis. Toodet ei tohi keemiliselt puhastada ega triikida. Mitte kasutada kloori sisaldavaid tooteid, sealhulgas pleegitusaineid. Need võivad toodet kahjustada.
- Toode võib värvi anda. Toodet ei tohi pesta koos valge või värvilise pesuga.

Koostis: Nailon, polüuretaan, stüreen ja polüester

Maaletooja: **A2K Sport OÜ**, Papiiniidu 5, Pärnu, Tel: 44 52 936; fax:44 52 938, e-mail: info@a2k.ee, www.a2k.ee