

HA-1



Alljärgnev juhend tuleb enne toote kasutamist hoolikalt läbi lugeda.

*Käesolev toode on mõeldud tallavõlvi toestamiseks, kuid toote sobivus erineb kasutajast sõltuvalt.

*Käesolev toode ei hoia ära ega paranda jalavigastusi.

Kuidas kasutada:

Sokid on mõeldud spetsiaalselt parema ja vasaku jala jaoks. Kontrollige, et kumbki sokk oleks õiges jalas.

Ettevaatusabinõud:

-Kahjulike mõjude ennetamiseks ei tohi sokke kasutada alljärgnevatel juhtudel:

- Kui teie nahk on tundlik või kui te olete allergiline
- Kui toote kasutamise piirkonnas esineb löikehaav, luumurd, tundetus, paistetust või lööve

-Vereringe häirete või vigastuste vältimiseks tuleb järgida alltoodud juhiseid ning kasutada toodet nõuetekohasel viisil.

- Toode peab olema õiges suuruses. (Vt. karbil toodud suuruste tabelit.)
- Toodet ei tohi kasutada magamise ajal.
- Toodet ei tohi kasutada pika aja vältel.

-Kui kogete järgmisi kahjulikke mõjusid, siis tuleb toote kasutamine viivitamatult lõpetada ning konsulteerida arstiga.

- Toote kandmine põhjustab ebamugavust
- Toote kasutamise piirkonnas esineb löikehaav, luumurd, valu, tundetus, paistetust või lööve.

Toote hooldamine:

-Toodet pesumasinas pestes tuleb kasutada pesukotti.

-Toode võib värvi anda. Toodet ei tohi pesta koos valge või värvilise pesuga.

-Toodet ei tohi kuivatada pesukuivatis.

Koostis:

Puuvill, akrüül, polüuretaan, nailon ja polüester

Maaletooja: A2K Sport OÜ Riia mnt 169a, Pärnu, Tel: 5079899; fax: 44 52 938, e-mail: info@a2k.ee, www.a2k.ee