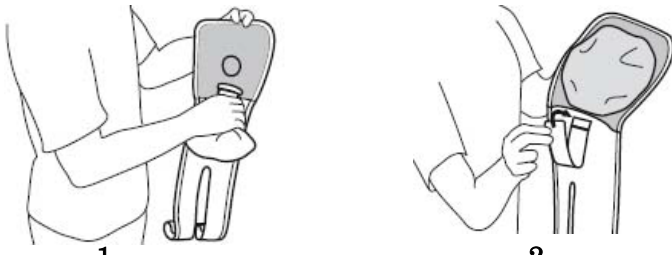
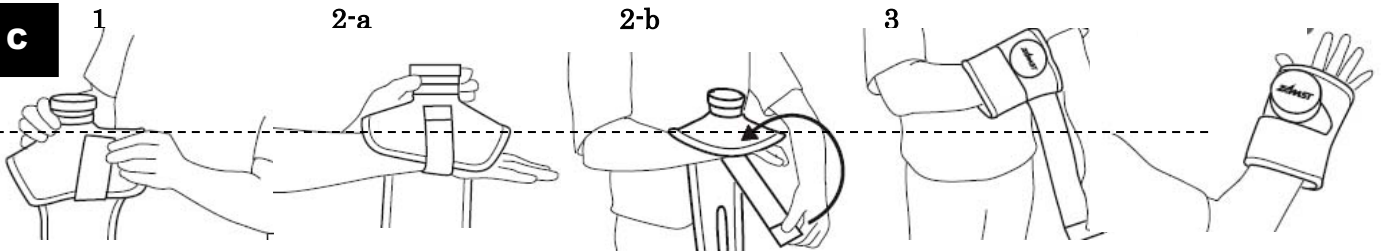
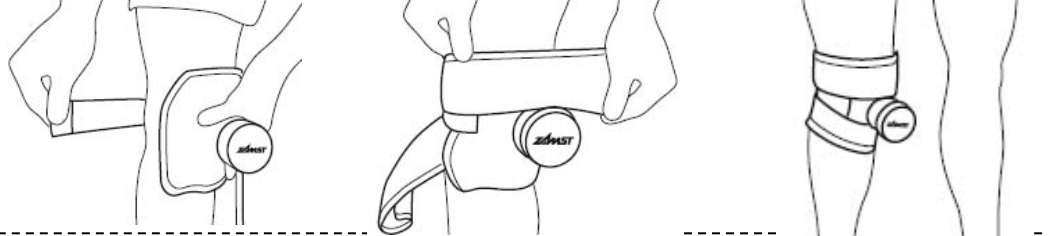


**A****B****C****D****E**

1

2

3

ZAMST IW-1 KASUTUSJUHEND

Alljärgnev juhend tuleb enne toote kasutamist hoolikalt läbi lugeda.

0000 n1 n5

Kavandatud kasutus: Hoidke Zamst jääkotti küünarnukil, randmel, pahklul, põvel, reiel või sääremarjal.

Toodet ei tohi kasutada alltoodud juhtudel:

-Toode sisaldab looduslikku kummilateksit, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Kui olete lateksi suhtes allergiline, siis ei tohi seda toodet kasutada.

Lateks võib põhjustada selliseid allergilisi reaktsioone nagu naha sügelus, punasus, lööve, paistetust, palavik, hingamisraskused, astmasarnased sümptomid, vererõhu langus ja šokk. Nimetatud sümptomite esinemise korral tuleb toote kasutamine lõpetada ning viivitamatult arstiga konsulteerida.

-Kui toote kasutamise piirkonnas esineb löikehaavu, luumurde, tundetust, paistetust või löövet.

Ohutusabinõud:

- Kui toote kasutamise ajal esineb valu, paistetust, nahaärritus, ebamugavust või muud ebatavaline reaktsioon, siis tuleb toote kasutamine lõpetada ning konsulteerida arstiga.

-Kui teil on tundlik nahk või kui teil esineb allergiat, siis võib toote kasutamine põhjustada löövet või allergilisi reaktsioone. Selliste sümptomite esinemise korral tuleb toote kasutamine lõpetada ning konsulteerida arstiga.

-Toodet ei tohi kasutada, kui see on katki või kulunud või kui takjakinnitus ei tööta.

-Toode ei tohi olla liiga pingul ega avaldada liiga tugevat survet. See võib häirida vereringet.

-Jääga täidetud jääkotti ei tohi hoida kehal pikema aja vältel. See võib põhjustada külmakahjustust.

-Kui teil esineb närvikahjustusi, mille põhjuseks on näiteks diabeet, jäseme halvatus või muu häire piirkonnas, kuhu soovite jääkoti paigutada, siis tuleb enne jääpaki kasutamist konsulteerida arstiga. Kui jääkoti kasutamine võib avaldada kahjulikku toimet, siis ei pruugi te seda ise tunda.

-Toodet tohib kasutada ainult kasutusjuhendis ette nähtud kehaosadel.

-Kui toode nihkub oma kohalt või lõtvub, siis tuleb toode vastavalt punktis "Kuidas kasutada" toodud juhistele uuesti paigaldada.

- Toodet ei tohi muuta ega parandada. See võib muuta toote kasutuskõlbmatuks ja/või põhjustada kehavigastusi.

Toote kahjustamise ennetamiseks:

- Toode võib higistamise või muude vedelike toimel värvi muuta. Toode võib selle all või lähedal kantavatele riietele värvi anda.

- Veenduge, et takjakinnitused ei puutuks kanga vastu, kuna need võivad kangast kahjustada.

Kuidas kasutada:

* Joonistel on kujutatud paremat küünarnukki/ranne/pahklud/põlve. Toode ei ole mõeldud spetsiaalselt paremal või vasakul pool kasutamiseks, mistõttu kasutamine toimub samal viisil ka vasakul küünarnukil/ranne/pahklul/põlvel.

A) Kuidas paigaldada jääkotti

1. Asetage jääkott võrktaskusse. Sisestage jääkoti kork avasse.
2. Võrktasku lähedal asuvat sisemist rihma kasutatakse koti paigaldamiseks. Kui te seda kasutada ei soovi, siis voltige see kaheks ning kinnitage haak.

B) Kasutamine küünarnukil

1. Moodustage silmus, selleks tuleb kinnitada sisemise rihma haak.
- 2-a. Pistke käsi silmusest läbi. Libistage toode küünarnuki kohale.
- 2-b. Kui teil esineb raskusi käe silmusest läbi pistmisega, siis asetage toode kõigepealt käsivarrele ning seejärel kinnitage sisemise rihma haak.
3. Mähkige toode ümber küünarnuki nii, et rihmad jäävad kummalegi poole jääkoti korki. Kinnitage haagid.
4. Toode on nõuetekohaselt paigaldatud.

C) Kasutamine randmel

1. Moodustage silmus, selleks tuleb kinnitada sisemise rihma haak.
- 2-a. Pistke käsi silmusest läbi. Paigutage toode randme kohale.
- 2-b. Kui teil esineb raskusi käe silmusest läbi pistmisega, siis asetage toode kõigepealt käsivarrele ning seejärel kinnitage sisemise rihma haak.
3. Mähkige toode ümber randme nii, et rihmad jäävad kummalegi poole jääkoti korki. Kinnitage haagid.
4. Toode on nõuetekohaselt paigaldatud.

D) Kasutamine pahklul

1. Paigutage toode pahkluu kohale. Kinnitage sisemise rihma haak.
2. Mähkige toode ümber pahkluu nii, et rihmad jäävad kummalegi poole jääkoti korki. Kinnitage haagid.
3. Toode on nõuetekohaselt paigaldatud.

E) Kasutamine põlvel, reiel või sääremarjal

*Joonistel on kujutatud toote kasutamist põlvel. Toodet saab samal viisil kasutada ka reiel ja sääremarjal.

1. Asetage toode põlvele. Kinnitage sisemise rihma haak.
2. Mähkige toode ümber põlve nii, et rihmad jäävad kummalegi poole jääkoti korki. Kinnitage haak.
3. Toode on nõuetekohaselt paigaldatud.

Kuidas pesta:

-Pesta käsitsi pehmetoimelise pesuvahendiga ning lasta õhu käes kuivada. -Toodet ei tohi kuivatada pesukuivatis.

Toodet ei tohi keemiliselt puhastada ega triikida. Mitte kasutada kloori sisaldavaid tooteid, sealhulgas pleegitusaineid. Need võivad toodet kahjustada.

-Toode võib värvi anda. Toodet ei tohi pesta koos valge või värvilise pesuga.

Koostis: Vahtpolüuretaan, nailon, polüester, polüuretaan, kumm (sisaldab lateksit) ja kunstsiid

Maaletooja: A2K Sport OÜ Riia mnt 169a, Pärnu, Tel: 5079899; fax:44 52 938, e-mail: info@a2k.ee, www.a2k.ee