




1

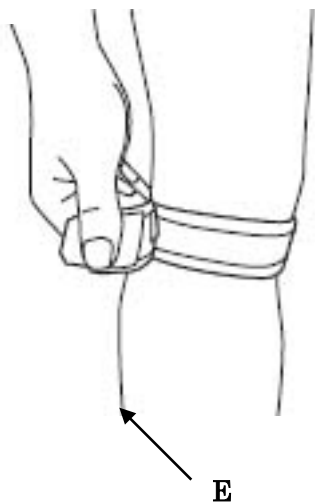

3

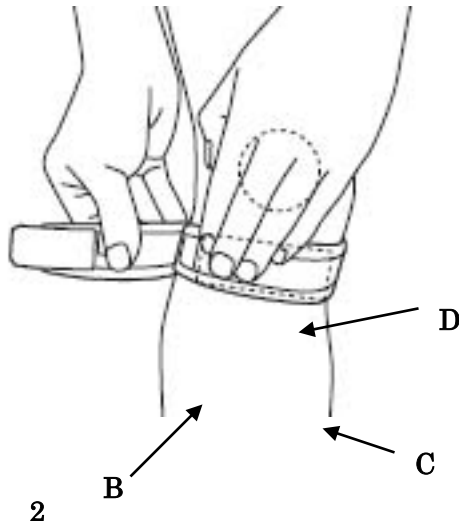

2

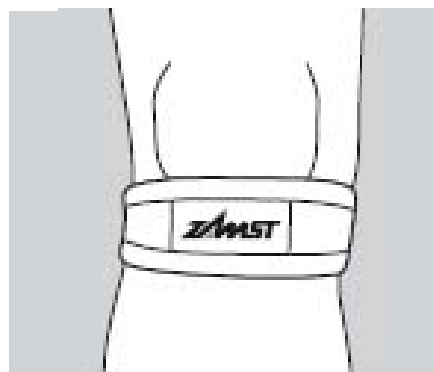

4

ZAMST JK SIDE KASUTUSJUHEND

2009 01 05

Alljärgnev juhend tuleb enne toote kasutamist hoolikalt läbi lugeda.

Kavandatud kasutus: Põlvekedra aluse piirkonna (patellaarse kõõluse) kaitse ja toetus.

*Käesolev toode ei ole mõeldud raviotstarbeks.

* Käesolev toode on mõeldud põlve toetamiseks; kuid see ei hoia ära kõiki põlvevigastusi.

Toodet ei tohi kasutada alltoodud juhtudel:

- Kui toote kasutamise piirkonnas esineb löikehaavu, luumurde, tundetust, paistetust või löövet.

Ohutusabinõud:

- Kui toote kasutamise ajal esineb valu, paistetus, nahaärritus, ebamugavus või muud ebatavaline reaktsioon, siis tuleb toote kasutamine lõpetada ning konsulteerida arstiga.

-Kui teil on tundlik nahk või kui teil esineb allergiat, siis võib toote kasutamine põhjustada löövet või allergilisi reaktsioone. Selliste sümptomite esinemise korral tuleb toote kasutamine lõpetada ning konsulteerida arstiga.

- Toodet ei tohi kasutada magamise ajal. Kui toode magamise ajal valesse asendisse liigub või kui seda kasutatakse pikema aja vältel, võib see häirida vereringet.

-Kui kehaosa on pikemat aega toetatud, võib see avaldada kahjulikku mõju vereringele või tekitada ebamugavust. Sellise olukorra vältimiseks on soovitatav toode regulaarselt eemaldada ning hiljem soovitud kohale uuesti tagasi asetada.

- Toodet ei tohi kasutada, kui see on katki või kulunud või kui takjakinnitus ei tööta.

- Toode peab olema õiges suuruses. (Vt. pakendil toodud suuruste tabelit ja toote sees asuvat suurusnumbri etiketti.)

-Toode ei tohi olla liiga pingul ega avaldada liiga suurt survet.

- Kui toode nihkub oma kohalt või lõtvub, siis tuleb toode vastavalt punktis "Kuidas kasutada" toodud juhistele uuesti paigaldada.

- Toodet ei tohi muuta ega parandada. See võib muuta toote kasutuskõlbmatuks ja/või põhjustada kehavigastusi.

Toote kahjustamise ennetamiseks:

- Toode võib higistamise või muude vedelike toimel värvi muuta. Toode võib selle all või lähedal kantavatele riietele värvi anda.

- Veenduge, et takjakinnitused ei puutuks kanga vastu, kuna need võivad kangast kahjustada.

Kuidas kasutada:

* Joonistel on kujutatud paremat põlve. (Toode ei ole mõeldud kasutamiseks spetsiaalselt paremal või vasakul pool.)

1. Avage kõik takjakinnitused. Paigutage side nii, et 3-D patellaarse kõõluse polster (A) oleks kohakuti põlvekedra aluse piirkonnaga (patellaarne kõõlus). (Joonis 1)
2. Sideme jala ümber mähkimiseks tõmmake rihmast. Kinnitage haak (B). Kontrollige, et patellaarse kõõluse polster (C) jääb oma kohale põlvekedra all (D). (Joonis 2)
3. Tõmmake sidet ja kinnitage teine haak (E). (Joonis 3) Surve reguleerimiseks muutke sideme pinget. Õige surve saavutamiseks tuleb sidet pingutada või lõdvendada.
4. Toode on nõuetekohaselt kinnitatud. (Joonis 4)

Kuidas pesta:

- Pesta käsitsi pehmetoimelise pesuvahendiga ning lasta õhu käes kuivada. -Toodet ei tohi kuivatada pesukuivatis.
- Toodet ei tohi keemiliselt puhastada ega triikida. Mitte kasutada kloori sisaldavaid tooteid, sealhulgas pleegitusaineid. Need võivad toodet kahjustada.
- Toode võib värvi anda. Toode ei tohi pesta koos valge või värvilise pesuga.

Koostis: Nailon, polüuretaan, polüester ja polüetüleen

Maaletooja:A2K Sport OÜ Riia mnt 169a, Pärnu, Tel: 5079899; fax:44 52 938, e-mail: info@a2k.ee, www.a2k.ee