

ZAMST PÖIDLAKAITSE KASUTUSJUHEND

2009.01.05

Alljärgnev juhend tuleb enne toote kasutamist hoolikalt läbi lugeda.

Kavandatud kasutus: Pöidla kaitse ja fikseerimine

* Käesolev toode ei ole mõeldud raviotstarbeks.

* Käesolev toode on mõeldud pöidla toetamiseks; kuid see ei hoia ära kõiki pöidlavigastusi.

Toodet ei tohi kasutada alltoodud juhtudel:

- Kui toote kasutamise piirkonnas esineb löikehaavu, luumurde, tundetust, paistetust või löövet.

Ohutusabinõud:

- Kui toote kasutamise ajal esineb valu, paistetust, nahaärritus, ebamugavust või muud ebatavaline reaktsioon, siis tuleb toote kasutamine lõpetada ning konsulteerida arstiga.

- Kui teil on tundlik nahk või kui teil esineb allergiat, siis võib toote kasutamine põhjustada löövet või allergilisi reaktsioone. Selliste sümptomite esinemise korral tuleb toote kasutamine lõpetada ning konsulteerida arstiga.

- Toodet ei tohi kasutada magamise ajal. Kui toode magamise ajal valesse asendisse liigub või kui seda kasutatakse pikema aja vältel, võib see häirida vereringet.

- Kui kehaosa on pikemat aega toetatud, võib see avaldada kahjulikku mõju vereringele või tekitada ebamugavust. Sellise olukorra vältimiseks on soovitatav toode regulaarselt eemaldada ning hiljem soovitud kohale uuesti tagasi asetada.

- Toodet ei tohi kasutada, kui see on katki või kulunud või kui takjakinne ei tööta.

- Toode peab olema õiges suuruses. (Vt. pakendil toodud suuruste tabelit ja toote siseküljel olevat suurusnumbri etiketti.)

- Rihma ei tohi liiga kõvasti kinni tõmmata ning tugi ei tohi avaldada liiga tugevat survet.

- Kui toode nihkub oma kohalt või lõtvub, siis tuleb toode vastavalt punktis "Kuidas kasutada" toodud juhistele uuesti paigaldada.

- Toodet ei tohi muuta ega parandada, välja arvatud käesolevas juhendis kirjeldatud reguleerimine. See võib muuta toote kasutuskõlbmatuks ja/või põhjustada kehavigastusi.

- Kui toodet kasutab laps, siis peab täiskasvanu enne toote esmakordset kasutamist seda vastavalt käesolevas juhendis kirjeldatud juhistele reguleerima.

- Põletuste vältimiseks tuleb kuumat vett kasutamisel olla ettevaatlik.

- Pärast toote kuuma vette kastmist tuleb liigne vesi käteräti abil eemaldada ning kontrollida, et toode poleks enne käele asetamist liiga kuum.


Toote kahjustamise ennetamiseks:

- Toode võib higistamise või muude vedelike toimel värvi muuta. Toode võib selle all või lähedal kantavatele riietele värvi anda.

- Veenduge, et takjakinnitused ei puutuks kanga vastu, kuna need võivad kangast kahjustada.

Kuidas reguleerida ja kasutada:

* Joonistel on kujutatud paremat kätt. Toode ei ole mõeldud kasutamiseks spetsiaalselt paremal või vasakul pool, mistõttu kasutamine toimub samal viisil ka vasakul käel.

1. Pange valmis käterätik liigse vee eemaldamiseks ja anum (näiteks kauss), mille saab täita kuuma veega ja kuhu toode mahub. (Joonis 1)
2. Valage konteinerisse kuuma vett (ligikaudu 70 °C/158 °F). (Joonis 2)
3. Avage takjakinnitused. Võtke kahest kinnitusest kinni. (Joonis 3)
4. Kastke toote põhiosa 15 kuni 20 sekundiks kuuma vette.  Olge ettevaatlik, et ennast mitte kõrvetada. (Joonis 4)
5. Võtke toode kuumast veest välja ja eemaldage käterätiku abil liigne vesi. (Joonis 5)
6. Veenduge, et toode ei oleks liiga kuum. Voltige toote põhiosa pikuti pooleks. (Joonis 6)
7. Libistage põial silmusesse (A) ja sättige toode asendisse, kuhu soovite pöidla fikseerida. (Joonis 7)
8. Kinnitage randmerihm (B). (Joonis 8)
9. Kinnitage pöidlarihm (C). (Joonis 9)
10. Katke toode teise käega ning seadke see nii, et toode sobiks mugavalt sõrme ja käega. Hoidke toodet selles asendis, kuni see kõveneb. (Joonis 10)
Toode kõveneb kolme kuni nelja minuti jooksul pärast kuumast veest välja võtmist. Kui soovite, et toode kiiremini kõveneks, siis kastke see korraks külma vette.

*Kui olete toote esmakordseks kasutamiseks reguleerinud, alustage punktist 7 ja lõpetage punktiga 9.

*Kui toote põhiosa läheb kasutamise käigus vormist välja, siis saab seda uuesti reguleerida. Toodet saab reguleerida ligikaudu 20 korda.

Kuidas pesta:

- Pesta käsitsi pehmetoimelise pesuvahendiga ning lasta õhu käes kuivada. - Toodet ei tohi kuivatada pesukuivatis.

Toodet ei tohi keemiliselt puhastada ega triikida. Mitte kasutada kloori sisaldavaid tooteid, sealhulgas pleegitusaineid. Need võivad toodet kahjustada.

- Toode võib värvi anda. Toodet ei tohi pesta koos valge või värvilise pesuga.

Koostis: Nailon, polüester, polüuretaan ja isopreenvaht

Maaletooja: A2K Sport OÜ Riia mnt 169a, Pärnu, Tel: 50798996; fax:44 52 938, e-mail: info@a2k.ee, www.a2k.ee