


WRIST

ZAMST

ATHLETE SAVER

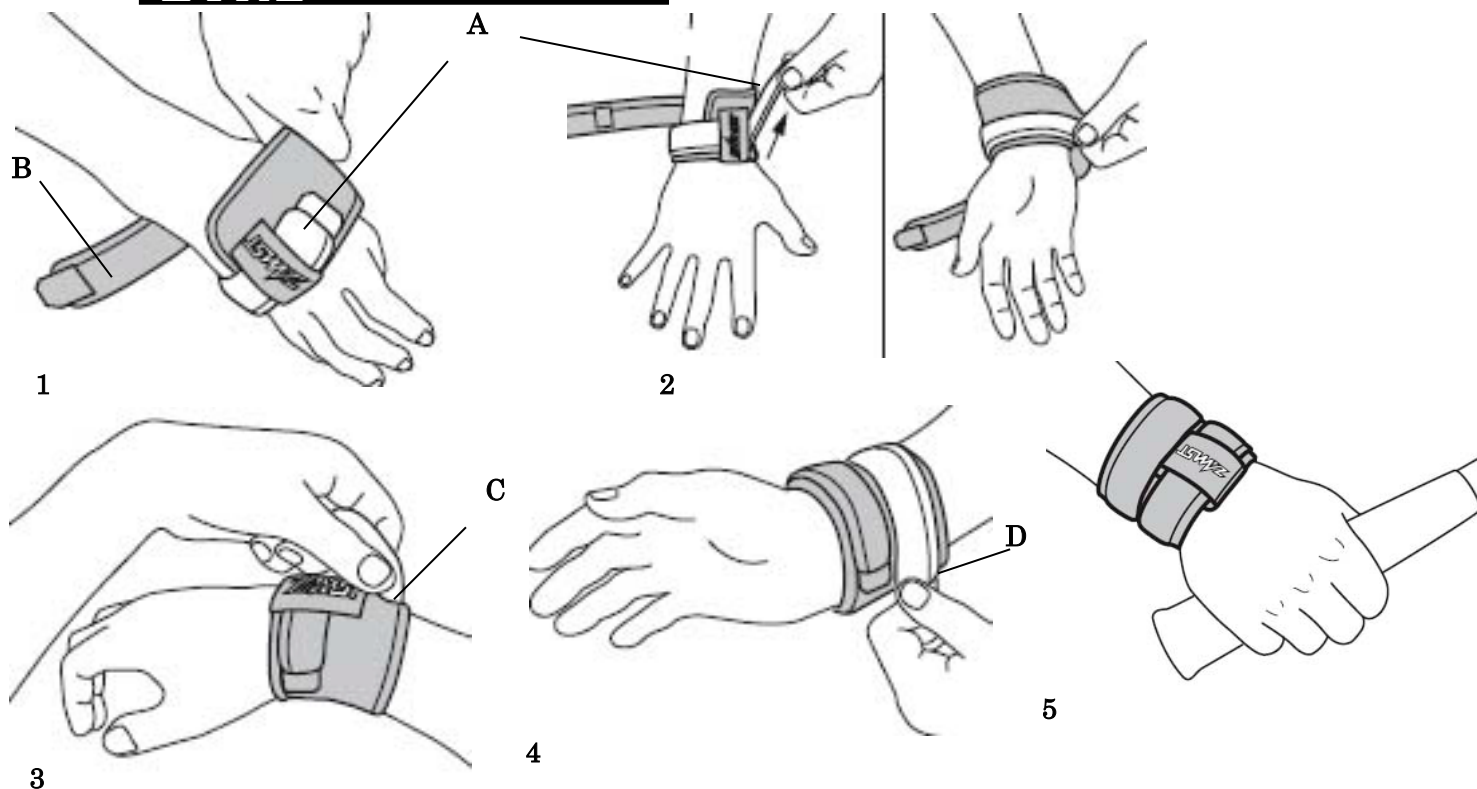

ZAMST RANDMESIDE KASUTUSJUHEND

Alljärgnev juhend tuleb enne toote kasutamist hoolikalt läbi lugeda.

2009 01 05

Kavandatud kasutus: Randme toestamine

*Käesolev toode ei ole mõeldud raviotstarbeks.

*Käesolev toode on mõeldud randme toetamiseks; kuid see ei hoia ära kõiki randmevigastusi.

Toodet ei tohi kasutada alltoodud juhtudel:

-**Toode sisaldab looduslikku kummilateksit, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.** Kui olete lateksi suhtes allergiline, siis ei tohi seda toodet kasutada. Lateks võib põhjustada selliseid allergilisi reaktsioone nagu naha sügelus, punasus, lööve, paistetust, palavik, hingamisraskused, astmasarnased sümptomid, vererõhu langus ja šokk. Nimetatud sümptomite esinemise korral tuleb toote kasutamine lõpetada ning viivitamatult arstiga konsulteerida.

-Kui toote kasutamise piirkonnas esineb löikehaavu, luumurde, tundetust, paistetust või löövet.

Ohutusabinõud:

- Kui toote kasutamise ajal esineb valu, paistetust, nahaärritus, ebamugavust või muud ebatavaline reaktsioon, siis tuleb toote kasutamine lõpetada ning konsulteerida arstiga.

-Kui teil on tundlik nahk või kui teil esineb allergiat, siis võib toote kasutamine põhjustada löövet või allergilisi

reaktsioone. Selliste sümptomite esinemise korral tuleb toote kasutamine lõpetada ning konsulteerida arstiga.

-Toodet ei tohi kasutada magamise ajal. Kui toode magamise ajal valesse asendisse liigub või kui seda kasutatakse pikema aja vältel, võib see häirida vereringet.

-Kui kehaosa on pikemat aega toestatud, võib see avaldada kahjulikku mõju vereringele või tekitada ebamugavust.

Sellise olukorra vältimiseks on soovitatav toode regulaarselt eemaldada ning hiljem soovitud kohale uuesti tagasi asetada.

-Toodet ei tohi kasutada, kui see on katki või kulunud või kui takjakinnitus ei tööta.

- Enne toote kasutamist tuleb veenduda, et tegemist on õiges suuruses tootega. (Vt. pakendil toodud suuruste tabelit ja toote sees asuvat suurusnumbri etiketti.)

-Rihma ei tohi liiga kõvasti kinni tõmmata ning tugi ei tohi avaldada liiga tugevat survet.

- Kui toode nihkub oma kohalt või lõtvub, siis tuleb toode vastavalt punktis "Kuidas kasutada" toodud juhiste uuesti paigaldada.

-Toodet ei tohi muuta ega parandada. See võib muuta toote kasutuskõlbmatuks ja/või põhjustada kehavigastusi.

Toote kahjustamise ennetamiseks:

-Toode võib higistamise või muude vedelike toimel värvi muuta. Toode võib selle all või lähedal kantavatele riietele värvi anda.

- Veenduge, et takjakinnitused ei puutuks kanga vastu, kuna need võivad kangast kahjustada.

Kuidas kasutada:

*Joonistel on kujutatud paremat rannet. Toode ei ole mõeldud spetsiaalselt paremal või vasakul pool kasutamiseks, mistõttu kasutamine toimub samal viisil ka vasakul.

1. Viige rihm (A) läbi aasa, millel on toote logo. Tõmmake side käele. Üks rihm (A) jääb sõrmede poole ja teine rihm (B) küünarnuki poole. (Joonis 1)
2. Peopesa lahti hoides tõmmake ja pingutage rihma (A) sõrmede poole. Kui vajalik toetus on saavutatud, kinnitage rihm (A). (Joonis 2)
3. Tõmmake rihma (B) küünarnuki poole ja kinnitage rihma (B) keskel asuv haak (C). (Joonis 3)
4. Kinnitage rihma (B) otsas olev haak (D). (Joonis 4)
5. Toode on nõuetekohaselt kinnitatud. (Joonis 5)

6. Kuidas pesta:

-Pesta käsitsi pehmetoimelise pesuvahendiga ning lasta õhu käes kuivada. -Toodet ei tohi kuivatada pesukuivatis.

Toodet ei tohi keemiliselt puhastada ega triikida. Mitte kasutada kloori sisaldavaid tooteid, sealhulgas pleegitusaineid. Need võivad toodet kahjustada.

-Toode võib värvi anda. Toodet ei tohi pesta koos valge või värvilise pesuga.

Koostis: Polüester, polüuretaan, nailon ja kumm (sisaldab lateksit)

Maaletooja: A2K Sport OÜ, Papiiniidu 5, Pärnu, Tel: 44 52 936; fax:44 52 938, e-mail: info@a2k.ee, www.a2k.ee