


WRIST




1

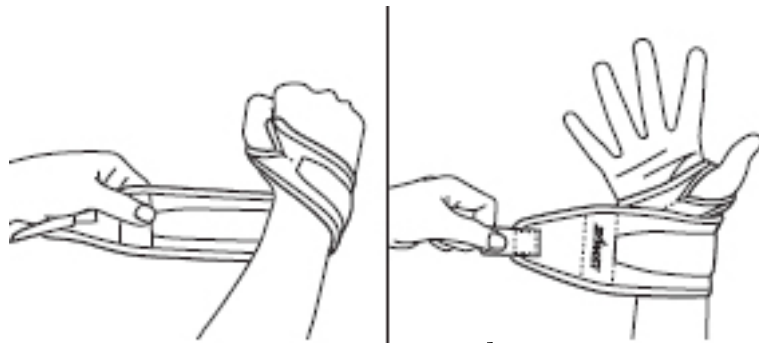

2-a

2-b

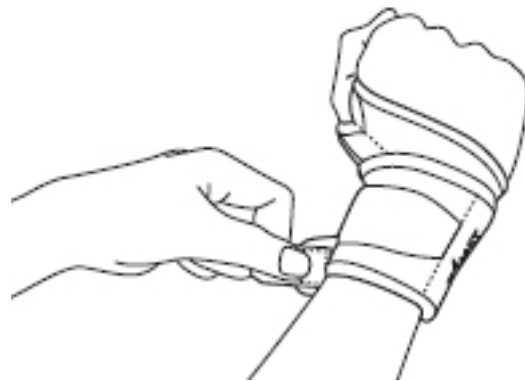

3

ZAMST RANDMESIDE KASUTUSJUHEND

Alljärgnev juhend tuleb enne toote kasutamist hoolikalt läbi lugeda.

Kavandatud kasutus: Randme toestamine

* Käesolev toode ei ole mõeldud raviotstarbeks.

* Käesolev toode on mõeldud randme toetamiseks; kuid see ei hoi ära kõiki randmevigastusi.

Toodet ei tohi kasutada alltoodud juhtudel:

- **Toode sisaldab looduslikku kummilateksit, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.** Kui olete lateksi suhtes allergiline, siis ei tohi seda toodet kasutada. Lateks võib põhjustada selliseid allergilisi reaktsioone nagu naha sügelus, punasus, lööve, paistetus, palavik, hingamisraskused, astmasarnased sümptomid, vererõhu langus ja šokk. Nimetatud sümptomite esinemise korral tuleb toote kasutamine lõpetada ning viivitamatult arstiga konsulteerida.

- Kui toote kasutamise piirkonnas esineb löikehaavu, luumurde, tundetust, paistetust või löövet.

Ohutusabinõud:

- Kui toote kasutamise ajal esineb valu, paistetus, nahaärritus, ebamugavus või muud ebatavaline reaktsioon, siis tuleb toote kasutamine lõpetada ning konsulteerida arstiga.

- Kui teil on tundlik nahk või kui teil esineb allergiat, siis võib toote kasutamine põhjustada löövet või allergilisi reaktsioone. Selliste sümptomite esinemise korral tuleb toote kasutamine lõpetada ning konsulteerida arstiga.

- Toodet ei tohi kasutada magamise ajal. Kui toode magamise ajal valesse asendisse liigub või kui seda kasutatakse pikema aja vältel, võib see häirida vereringet.

- Kui kehaosa on pikemat aega toetatud, võib see avaldada kahjulikku mõju vereringele või tekitada ebamugavust. Sellise olukorra vältimiseks on soovitatav toode regulaarselt eemaldada ning hiljem soovitud kohale uuesti tagasi asetada.

- Toodet ei tohi kasutada, kui see on katki või kulunud või kui takjakinnitus ei tööta.

- Toode peab olema õiges suuruses. (Vt. pakendil toodud suuruste tabelit ja toote siseküljel olevat suurusnumbri etiketti.)

- Rihma ei tohi liiga kõvasti kinni tõmmata ning tugi ei tohi avaldada liiga tugevat survet.

- Kui toode nihkub oma kohalt või lõtvub, siis tuleb toode vastavalt punktis "Kuidas kasutada" toodud juhiste uuesti paigaldada.

- Toodet ei tohi muuta ega parandada. See võib muuta toote kasutuskõlbmatuks ja/või põhjustada kehavigastusi.

Toote kahjustamise ennetamiseks:

- Toode võib higistamise või muude vedelike toimel värvi muuta. Toode võib selle all või lähedal kantavatele riietele värvi anda.

- Veenduge, et takjakinnitused ei puutuks kanga vastu, kuna need võivad kangast kahjustada.

Kuidas kasutada:

* Joonistel on kujutatud paremat rannet. Toode ei ole mõeldud spetsiaalselt paremal või vasakul pool kasutamiseks, mistõttu kasutamine toimub samal viisil ka vasakul randmel.

1. Pistke põial silmusesse ja laske sidemel rippuda. (Joonis 1)

Jätkamiseks on kaks võimalust:

2-a. Suruge käsi rusikasse ja mähkige side ümber käeselja. (Joonis 2-a)

2-b. Hoidke peopesa lahti ja mähkige side ümber peopesa. (Joonis 2-b)

3. Sideme randme ümber mähkimise ajal reguleerige selle survet. Kinnitage haak. (Joonis 3)

Kuidas pesta:

- Pesta käsitsi pehmetoimelise pesuvahendiga ning lasta õhu käes kuivada. - Toodet ei tohi kuivatada pesukuiivatis.

Toodet ei tohi keemiliselt puhastada ega triikida. Mitte kasutada kloori sisaldavaid tooteid, sealhulgas pleegitusaineid. Need võivad toodet kahjustada.

- Toode võib värvi anda. Toodet ei tohi pesta koos valge või värvilise pesuga.

Koostis: Stüreen, polüester, nailon, polüuretaan ja kumm (sisaldab lateksit)

Maaletooja: A2K Sport OÜ, Papiniidu 5, Pärnu, Tel: 44 52 936; fax: 44 52 938, e-mail: info@a2k.ee, www.a2k.ee