



2

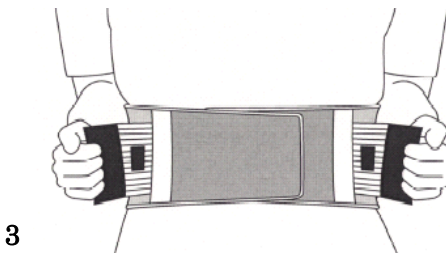

3

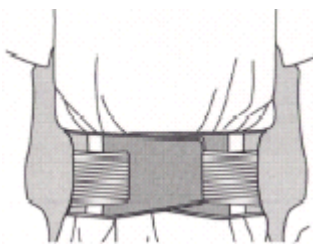

# ZAMST ZW-5/ZW-7 SELJA TUGI

## KASUTUSJUHEND

**Alljärgnev juhend tuleb enne toote kasutamist hoolikalt läbi lugeda.**

**Kavandatud kasutus:** Alaselja toetamine ja kaitse

\* Käesolev toode ei ole mõeldud raviotstarbeks.

\* Käesolev toode on mõeldud selja toetamiseks; kuid see ei hoia ära kõiki seljavigastusi.

**Toodet ei tohi kasutada alltoodud juhtudel:**

- Toode sisaldab looduslikku kummilateksit, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.** Kui olete lateksi suhtes allergiline, siis ei tohi seda toodet kasutada. Lateks võib põhjustada selliseid allergilisi reaktsioone nagu naha sügelus, punasus, lööve, paistetus, palavik, hingamisraskused, astmasarnased sümptomid, vererõhu langus ja šokk. Nimetatud sümptomite esinemise korral tuleb toote kasutamine lõpetada ning viivitamatult arstiga konsulteerida. (ainult ZW-7)
- Kui toote kasutamise piirkonnas esineb löikehaavu, luumurde, tundetust, paistetust või löövet.
- Raseduse korral.

**Ohutusabinõud:**

- Kui toote kasutamise ajal esineb valu, paistetus, nahaärritus, ebamugavus või muud ebatavaline reaktsioon, siis tuleb toote kasutamine lõpetada ning konsulteerida arstiga.
- Kui teil on tundlik nahk või kui teil esineb allergiat, siis võib toote kasutamine põhjustada löövet või allergilisi reaktsioone. Selliste sümptomite esinemise korral tuleb toote kasutamine lõpetada ning konsulteerida arstiga.
- Toodet ei tohi kasutada magamise ajal. Kui toode magamise ajal valesse asendisse liigub või kui seda kasutatakse pikema aja vältel, võib see häirida vereringet.
- Kui kehaosa on pikemat aega toetatud, võib see avaldada kahjulikku mõju vereringele või tekitada ebamugavust. Sellise olukorra vältimiseks on soovitatav toode regulaarselt eemaldada ning hiljem soovitud kohale uuesti tagasi asetada.
- Toodet ei tohi kasutada, kui see on katki või kulunud või kui takjakinnitus ei tööta.
- Toode peab olema õiges suuruses. (Vt. pakendil toodud suuruste tabelit ja toote siseküljel olevat suurusnumbri etiketti.)
- Rihmu ei tohi liiga kõvasti kinni tõmmata ning tugi ei tohi avaldada liiga tugevat survet.
- Kui toode nihkub oma kohalt või lõtvub, siis tuleb toode vastavalt punktis "Kuidas kasutada" toodud juhiste uuesti paigaldada.
- Toodet ei tohi muuta ega parandada. See võib muuta toote kasutuskõlbmatuks ja/või põhjustada kehavigastusi.
- Toodet kantakse kanga, nt. särgi peal.

**Toote kahjustamise ennetamiseks:**

- Toode võib higistamise või muude vedelike toimel värvi muuta. Toode võib selle all või lähedal kantavatele riistele värvi anda.
- Veenduge, et takjakinnitused ei puutuks toote tagaosas kasutatud võrkmaterjali või muu kanga vastu, kuna need võivad nimetatud materjale kahjustada.

**Kuidas kasutada:**

(ZW-5) Avage kõik takjakinnitused. Asetage tugi alaseljale. Toe tagaosas ülemine serv peaks ulatuma naba kõrgusele. Toote taga asuva logo keskoht peab olema kohakuti selgrooga. (Joonis 1)

(ZW-7) Avage kõik takjakinnitused. Asetage tugi alaseljale. Toe tagaosas ülemine serv peaks ulatuma ligikaudu 3 cm (1.2 in) nabast kõrgemale. Toote taga asuva logo keskoht peab olema kohakuti selgrooga.. (Joonis 1)

1. Tõmmake tuge mõlemalt küljelt ümber selja. Kinnitage haak. Toode on tõhusam, kui kinnitate esiosa veidi nabast allapoole. (Joonis 2)
2. Tõmmake välimised rihmad selja tagant ette. Kinnitage haagid. (Joonis 3)

**Kuidas pesta:**

- Pesta käsitsi pehmetoimelise pesuvahendiga ning lasta õhu käes kuivada. - Toodet ei tohi kuivatada pesukuiivatis.
- Toodet ei tohi keemiliselt puhastada ega triikida. Mitte kasutada kloori sisaldavaid tooteid, sealhulgas pleegitusaineid. Need võivad toodet kahjustada.
- Toode võib värvi anda. Toodet ei tohi pesta koos valge või värvilise pesuga.

**Koostis:** ZW-5: Nailon, polüuretaan, polüester, polüpropüleen ja stüreen

ZW-7: Nailon, polüuretaan, polüester, polüpropüleen ja stüreen, kumm (sisaldab lateksit)

**Maaletooja:** A2K Sport OÜ Riia mnt 169a, Pärnu, Tel: 5079899; fax: 44 52 938, e-mail: info@a2k.ee, www.a2k.ee